


本製品は、ぬるま湯にて中性洗剤を使って手洗いし、陰干ししてください。

お手入れ

A図

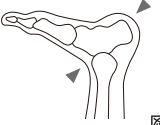

ASOの足首サポーターとしての機能を確実に引き出すには適切なサイズ選定が重要です。左の図のようにかかと甲の周径を計測し、サイズを選定してください。
お近くのASOサポーター販売店で試着することをおすすめします。

商品名	サイズ	適用範囲 (A図参照)	参考靴サイズ
ASO-SL	XS	25.5 - 28.0cm	23cm以下
	S	28.0 - 30.5cm	23.5 - 25cm
ASO-WS	M	30.5 - 33.0cm	25.5 - 27cm
	L	33.0 - 35.5cm	27.5 - 29cm
ASO-EVO	XL	35.5 - 38.0cm	29.5 - 31cm

全モデル共通 SIZING CHART

※靴サイズはあくまで目安です。



ASOコア部分が中心にくるようにカフストラップを固定します。

▶ 3. カフストラップ固定

図1のようにフックに指を入れて引っ張り上げてより固定力が上がります。

足首を90度に設定し、外側のフックをストラップから巻き付けます。足の甲→足の裏(ややかかと側)→くるぶしの上を通るように貼り付けます。内側も同様に巻き付けます。(外側に比べてやや軽めに固定してください。)


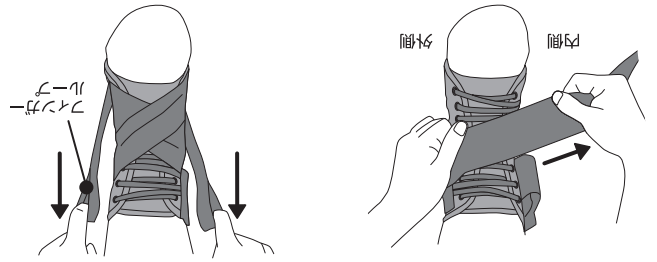


図1

▶ 2. フックをストラップに固定

装着の際は必ずソックスを着用してください。
メッシュのインナーパッドが甲の前面にくるようにサポーターを履き込みます。かかとをしっかりと合わせてください。レース部分を締め上げます。

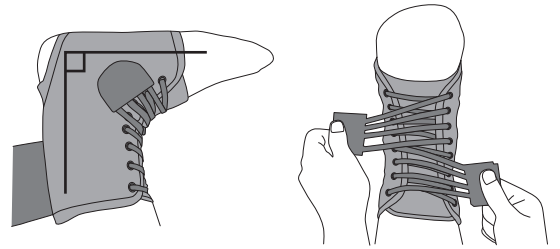

▶ 1. レース履き込み

ASO-SL 装着手順

ASO 取扱説明書



使用の際には以下のことにご注意ください

- 適正なサイズを着用してください。
- 本製品は足首の疾患を治療するものではありません。
- 長時間使用する時は、適度に脱着を行ってください。
- 本品を使用中に痛み・しびれ・かぶれ・湿疹・炎症などが発生した場合、直ちに使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 本製品は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 肌に直接身に付けるという商品の特性上、初期不良以外の返品・交換はお断りしております。
- 初期不良につきましては、ご購入から7日以内にご購入店舗、もしくはカスタマーサポートまでご連絡くださいますようお願い致します。



ASOは米国のMedical Specialties社の商標登録商品です。

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本文をご確認ください。
本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

株式会社 オンサイドワールド


〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13
カスタマーサポート: info@onsideworld.com
URL: www.onsideworld.com



本製品は、ぬるま湯にて中性洗剤を使って手洗いし、陰干ししてください。

お手入れ

A図 ASOの足首サポーターとしての機能を確実に引き出すには適切なサイズ選定が必要です。左の図のようにかかと甲の周径を計測し、サイズを選定してください。
お近くのASOサポーター販売店で試着することをおすすめします。

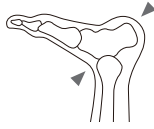

商品名	サイズ	適用範囲 (A図参照)	参考靴サイズ
ASO-SL	XS	25.5-28.0cm	23cm以下
	S	28.0-30.5cm	23.5-25cm
ASO-WS	M	30.5-33.0cm	25.5-27cm
	L	33.0-35.5cm	27.5-29cm
ASO-EVO	XL	35.5-38.0cm	29.5-31cm

全モデル共通 SIZING CHART

※靴サイズはあくまで目安です。

ASOコア部分が中心になるようにカフストラップを固定します。



▶ 3. カフストラップ固定

図1のようにコアケーブルに指を入れてしっかりと引き上げるとより固定力が上がります。

足首を90度に設定し、外側のコアケーブルから巻き付けます。足の甲・足の裏(ややかかと側)→くるぶしの上を通るように貼り付けます。内側も同様に巻き付けます。(外側に比べてやや軽めに固定してください。)


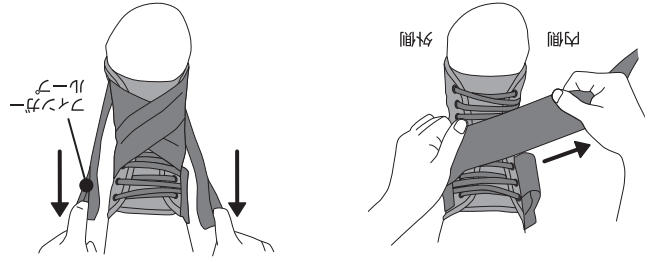


図1

▶ 2. コアケーブルストラップ固定

装着の際は必ずソックスを着用してください。
メッシュのインナーパッドが甲の前面にくるようソックスを履き込みます。かかとをしっかりと合わせてください。レース部分を締め上げます。

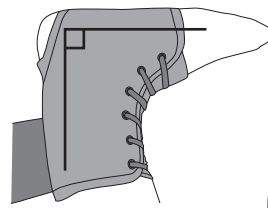

▶ 1. レース履き込み

ASO-WS 装着手順

ASO 取扱説明書



使用の際には以下のことにご注意ください

- 適正なサイズを着用してください。
- 本製品は足首の疾患を治療するものではありません。
- 長時間使用する時は、適度に脱着を行ってください。
- 本品を使用中に痛み・しびれ・かぶれ・湿疹・炎症などが発生した場合、直ちに使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 本製品は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 肌に直接身に付けるという商品の特性上、初期不良以外の返品・交換はお断りしております。
- 初期不良につきましては、ご購入から7日以内にご購入店舗、もしくはカスタマーサポートまでご連絡くださいますようお願い致します。



ASOは米国のMedical Specialties社の商標登録商品です。

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本文をご確認ください。
本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

株式会社 オンサイドワールド

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13
カスタマーサポート: info@onsideworld.com
URL: www.onsideworld.com




上がります。

図1のようにアンクルロープに指を入れて引っ張り上げてより固定力が

内側も同様に巻き付けます。(外側に比べてやや軽めに固定してください。)

足の甲→足の裏(ややかかと側)→くるぶしの上を通るように貼り付けます。
足を90度に設定し、外側のフキエアーストラップから巻き付けます。

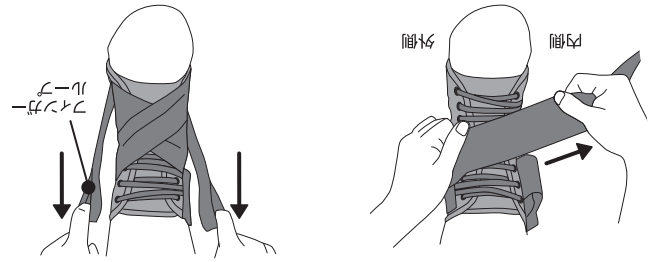


▶ 2. フキエアーストラップ固定

ストラップを垂直に引き上げ、かかとを持ち上げます。

かかとをしっかりと合わせてください。レース部分を締め上げます。フキエアーストラップのインナーパッドが甲の前面にくるようにサポーターを履き込みます。

装着の際は必ずソックスを着用してください。

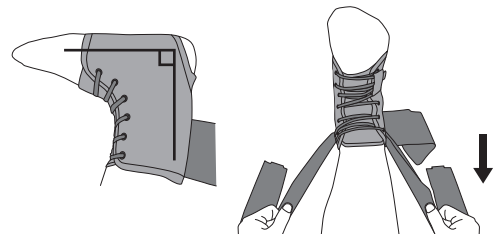

▶ 1. レース履き込み

ASO-EVO 装着手順



ASOは米国のMedical Specialties社の商標登録商品です。

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。


ご使用になる前に必ず本文をご確認ください。

本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

本製品は、ぬるま湯にて中性洗剤を使って手洗いし、陰干ししてください。

お手入れ

A図 ASOの足首サポーターとしての機能を確実に引き出すには適切なサイズ選定が必要です。左の図のようにかかと甲の周径を計測し、サイズを選定してください。
お近くのASOサポーター販売店で試着することをおすすめします。

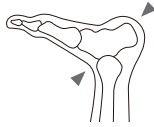

商品名	サイズ	適用範囲 (A図参照)	参考靴サイズ
ASO-SL	S	23.0-30.5cm	23.5-25cm
ASO-SL	XS	25.5-28.0cm	23cm以下
ASO-WS	M	30.5-33.0cm	25.5-27cm
ASO-WS	L	33.0-35.5cm	27.5-29cm
ASO-EVO	L	33.0-35.5cm	27.5-29cm
ASO-EVO	XL	35.5-38.0cm	29.5-31cm

全モデル共通 SIZING CHART

※靴サイズはあくまで目安です。

ASOコア部分が中心にくるように
カフストラップを固定します。



▶ 3. カフストラップ固定

ASO 取扱説明書



使用の際には以下のことにご注意ください

- 適正なサイズを着用してください。
- 本製品は足首の疾患を治療するものではありません。
- 長時間使用する時は、適度に脱着を行ってください。
- 本品を使用中に痛み・しびれ・かぶれ・湿疹・炎症などが発生した場合、直ちに使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 本製品は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 肌に直接身に付けるという商品の特性上、初期不良以外の返品・交換はお断りしております。
- 初期不良につきましては、ご購入から7日以内にご購入店舗、もしくはカスタマーサポートまでご連絡くださいますようお願い致します。

株式会社 オンサイドワールド

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13
カスタマーサポート: info@onsideworld.com
URL: www.onsideworld.com

